


# Dispositivo de ESP Stat-A-Dyne

¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en [www.lantzmedical.com](http://www.lantzmedical.com).

**\*Se recomienda que esté sentado o acostado mientras usa el dispositivo de control de contracturas Stat-A-Dyne.**

- **Extienda el dispositivo a la longitud adecuada para su antebrazo. (Ajuste la longitud al aflojar los dos tornillos que se encuentran al costado del dispositivo).**
- **Una vez que se haya ajustado el largo del dispositivo, coloque el dispositivo primero poniendo el antebrazo en el manguito distal (alejado) e insertando el pulgar a través del orificio para el pulgar.**  
\* El pulgar debe pasar cómodamente por el orificio para el pulgar para evitar cualquier presión en el ramo superficial del nervio radial.

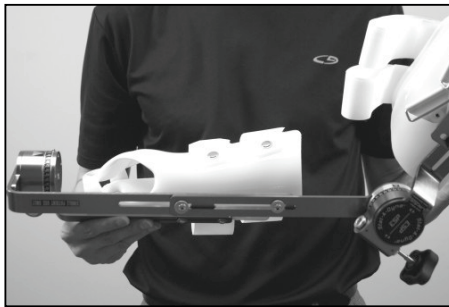

- **Después de que el antebrazo esté dentro del dispositivo, puede tirar el manguito del húmero sobre el bíceps/tríceps. Lo ideal es ajustar la altura del manguito del húmero para que haya tres dedos de ancho entre la parte superior del manguito y el pliegue de la axila. (La altura del manguito del húmero puede ajustarse al aflojar las 2 tuercas mariposa al costado del dispositivo).**
- **Alinee la bisagra del codo con la articulación del codo.**



- **Ajuste las correas del antebrazo y del húmero.**
- **Ahora está listo para comenzar su sesión de tratamiento.**