


Dispositivo de pronación/ supinación Stat-A-Dyne

Instrucciones de colocación

¿Tiene alguna pregunta? No dude en llamarnos al **866-236-8889**. También puede encontrar más información sobre todos nuestros productos en www.lantzmedical.com.

*Se recomienda que esté sentado o acostado mientras usa el dispositivo de control de contracturas Stat-A-Dyne.

- Extienda el dispositivo a la longitud adecuada para su antebrazo. (Ajuste la longitud al aflojar los dos tornillos que se encuentran en la parte de abajo del dispositivo).
- Una vez que se haya ajustado el largo del dispositivo, coloque el dispositivo primero poniendo el antebrazo en el manguito distal (alejado) e insertando el pulgar a través del orificio para el pulgar.
* El pulgar debe pasar cómodamente por el orificio para el pulgar para evitar cualquier presión en el ramo superficial del nervio radial.

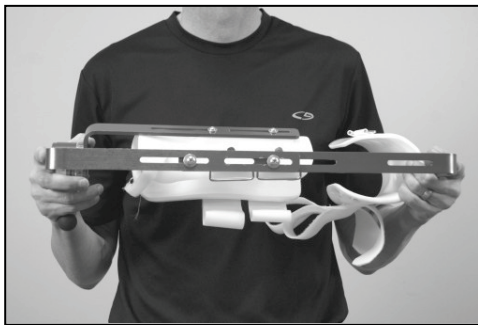

- Después de que el antebrazo esté dentro del dispositivo, puede tirar el manguito del húmero sobre el bíceps/tríceps. Lo ideal es ajustar la altura del manguito del húmero para que haya tres dedos de ancho entre la parte superior del manguito y el pliegue de la axila.



- Ajuste las correas del antebrazo y del húmero.
- Ahora está listo para comenzar su sesión de tratamiento.