



## Deslizador de WHFO Stat-A-Dyne Instrucciones de colocación

Paso 1.



Paso 2.




Paso 3.



1. Comience la colocación poniendo la ortesis en una posición acostada de lado sobre una mesa o superficie plana para optimizar la visualización de la cara palmar del dispositivo. Haga que el paciente deslice su mano a través de las correas sueltas en el extremo proximal del dispositivo.
2. Continúe deslizando la mano hacia adelante metiendo cada dedo en su respectivo lugar hasta que las yemas de los dedos estén firmemente contra el extremo causando un ligero tirón contra el guante.
3. Coloque la placa palmar en una posición justo por debajo del pliegue de la palma y aproximadamente en la línea media del dedo mayor asegurando el sistema de correas de arnés de 4 puntos. Recorte solo las correas cubitales en este punto.

Paso 4.

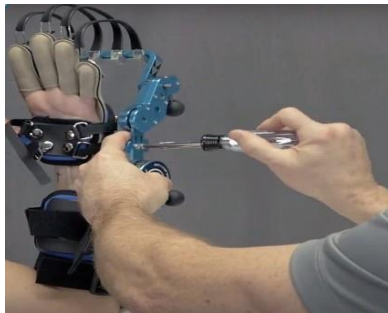


Paso 5.



Paso 6.



4. Luego, ajuste la bisagra lo más cerca posible del centro de la articulación de la muñeca aflojando los tornillos y .
5. El manguito del antebrazo ahora se desliza aproximadamente al centro del antebrazo entre el pliegue de la muñeca y el del codo. Asegure la correa distal y la cúpula palmar asegurándose de que la longitud y la orientación de la línea central sean las adecuadas.
6. Asegure la correa suelta en la hebilla de triple deslizamiento con lengüeta de velcro. Ahora, ajuste la longitud de la correa, recorte el exceso, asegure el extremo suelto y sujete ceñidamente la correa de la parte proximal del antebrazo.

Paso 7.



Paso 8.



Su dispositivo de WHFO Stat-A-Dyne está ahora listo para el tratamiento.



7. Una vez completado, coloque el dispositivo en posición vertical y afloje los tornillos en el soporte del antebrazo en forma de L. Deslice el puntal en orientación de línea media con el olécranon mientras coloca el bloque deslizante aproximadamente en el centro del riel deslizante. Ajuste los tornillos.
8. Si es necesario, recorte las correas del pulgar e inserte almohadillas para mayor comodidad y protección contra el borde de la correa en la base del pulgar y el espacio interdigital.